

(141005) **Arsénico Inorgánico + Metabolitos Metilados en orina**

Muestra: **ORINA FINAL DE TURNO**  
Muestra alternativa: **No tiene**  
Volumen mínimo: **2.1 mL** Conservación de la muestra: **Refrigerada**  
Plazo de entrega: **8 días laborables**  
Metodo: **ICP-MS.**

Otros nombres: **As en orina**  
**As en orina [total]**

Obtención de la muestra:

Recoger la orina después de 4 o 5 días consecutivos de trabajo con exposición, lo antes posible después del final de la última jornada, dado que los indicadores biológicos se eliminan con vidas medias superiores a las 5 horas.

---

---

---

---

**Arsénico Inorgánico + Metabolitos Metilados en orina**

Método: ICP-MS.

RESULTADO: **R1** µg/L

VALORES DE REFERENCIA:

Personas expuestas a ARSÉNICO ELEMENTAL y  
COMPUESTOS INORGÁNICOS SOLUBLES

Al final de la semana de trabajo: Hasta 35.0 µg/L

**Nota:** Valor límite biológico actualizado según LEP INSHT del 2011.

---